

一般用検査薬

第1類医薬品

一般用SARSコロナウイルス抗原キット(鼻腔用)



スタンダード Q COVID-19 Ag HomeTest (一般用)

一般用検査薬として厚生労働省の承認を取得した体外診断用医薬品(一般用医薬品)

- ✓ この検査薬は、薬剤師から説明を受け、「使用上の注意」をよく読んでお使いください
- ✓ 検査結果が「陽性」の場合は適切に医療機関の受診等を行ってください
- ✓ 検査結果が「陰性」であっても症状がある場合には、適切に医療機関の受診等を行ってください

特徴



新型コロナウイルス抗原を **15 ~ 30分** で検出
体調が気になる場合のセルフチェックに



使いやすく、お求めやすい **2テスト** 入り

製品情報

製品番号	88025
承認番号	30600EZX00016000
JANコード	4573198050752
製品名	スタンダード Q COVID-19 Ag HomeTest(一般用)
使用期限	製造日より2年間 ※LOTにより異なる場合がございます
寸法・重量	200W x 80D x 20H(mm) ・ 約 52g
保管温度	2 ~ 30℃

キット構成


- テストデバイス 2個
- 緩衝液チューブ 2個
- ノズルキャップ 2個
- 滅菌スワブ (綿棒) 2本
- 取扱説明書 1部
- 添付文書 1部





使用方法

鼻腔ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します

- 1 スワブを鼻腔に沿って2cm程度挿入します。
- 2 5回程度回転させ、検体を採取します。

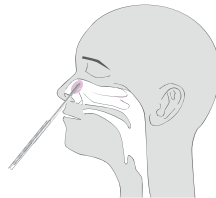

- 3 緩衝液チューブの側面を押しながらスワブを5回まわします。
- 4 緩衝液チューブの側面を押し液体をスワブから絞りだすように引き抜きます。
- 5 緩衝液チューブにノズルキャップを確実に取り付けます。
- 6 テストデバイスの検体滴下部に3滴滴下します。
- 7 必ず15~30分の間に結果を読み取ります。

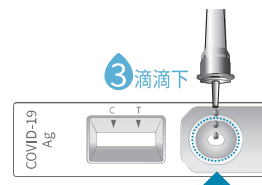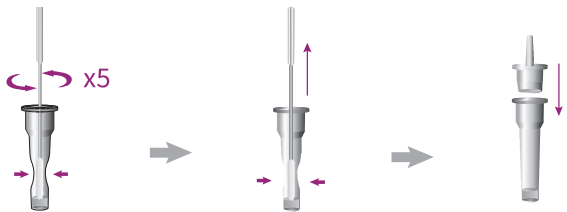


結果読み取り
15-30分の間
無効
30分以降

15-30 mins

30分以上経過した場合、正しい判定はできません。

注意

結果判定

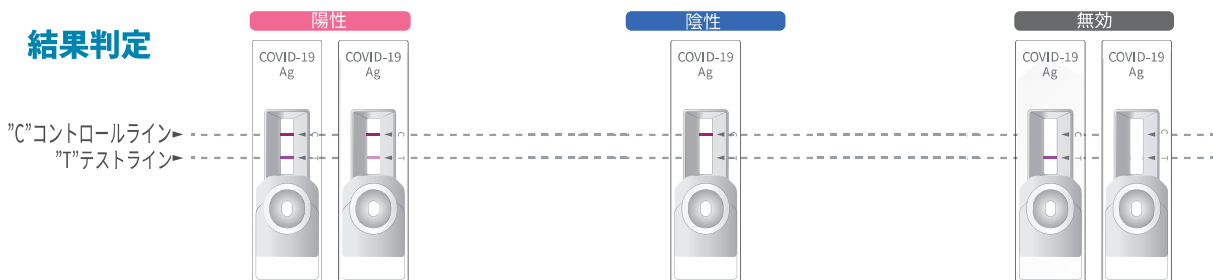

コントロールライン(C)とテストライン(T)の両方が出現した場合、陽性を示します。テストライン(T)が非常に薄い場合や均でない場合も陽性と判定されます。

コントロールライン(C)のみが出現した場合は、陰性と判定されます。

コントロールライン(C)が出現しない場合、測定は無効となります。

株式会社 **マルコム**

〒151-0071
東京都渋谷区本町4-15-10

e-mail: mdinfo@malcom.co.jp
URL: <http://www.malcom.co.jp>

製品に関するお問い合わせ先
マルコム コールセンター
0120-901-656
9:00~17:00 土日祝日を除く